



**Wellpoint New Jersey**

P. O. Box 62509  
Virginia Beach, VA 24466-2509

<Date>

<Parent or Guardian of>

<Member Name>

<Member Address>

<Member City, State ZIP>

Dear Member or Parent/Guardian of <Member Name>:

We have important updated medical device correction information about your prescription for Omnipod® 5 Pods.

Our records show that you may have recently filled a prescription for this product.

This notice updates a previously issued medical device correction to include additional affected lots. On March 12, 2026, Insulet Corporation issued a medical device correction of certain lot numbers of Omnipod® 5 Pods.

Insulet Corporation issued this Medical Device Correction after identifying a manufacturing issue through its ongoing product monitoring. According to Insulet Corporation, certain Pods from specific lots may have a small tear in the internal tubing that delivers insulin. If this occurs, insulin may leak inside the Pod instead of being fully infused into the body as intended potentially leading to under-delivery of insulin.

Insulet Corporation issued an update to this medical device correction, expanding the list of affected lots to include Pods that have expired, out of an abundance of caution.

**Product:** Omnipod® 5 Pods  
**NDC:** 08508-3000-21  
**Lot number/Expiration date:** PH1U10242521 exp. 10/24/27,  
PH1U10242531 exp. 10/24/27, PH1U10242541 exp. 10/24/27,  
PH1U10232531 exp. 10/23/27, PH1U10232541 exp. 10/23/27,  
PH1U10222531 exp. 10/22/27, PH1U10222541 exp. 10/22/27,  
PH1U10212531 exp. 10/21/27, PH1U10212541 exp. 10/21/27,  
PH1U10202511 exp. 10/20/27, PH1U10202521 exp. 10/20/27,

**[wellpoint.com/nj/medicaid](https://wellpoint.com/nj/medicaid)**

1091327NJMESWLP 05/26

OMHC# 078-25-59

105-CNMCD26059WLPNJ 051926



PH1U10202531 exp. 10/20/27, PH1U10202541 exp. 10/20/27,  
PH1U10182531 exp. 10/18/27, PH1U10182541 exp. 10/18/27,  
PH1U10172531 exp. 10/17/27, PH1U10172541 exp. 10/17/27,  
PH1U10162531 exp. 10/16/27, PH1U10162541 exp. 10/16/27,  
PH1U10152541 exp. 10/15/27, PH1U09252521 exp. 09/25/27,  
PH1U09252531 exp. 09/25/27, PH1U09242511 exp. 09/24/27,  
PH1U09242521 exp. 09/24/27, PH1U09242531 exp. 09/24/27,  
PH1U08182531 exp. 08/18/27, PH1U08182541 exp. 08/18/27,  
PH1U08162531 exp. 08/16/27, PH1U05052511 exp. 11/05/26,  
PH1U03312511 exp. 10/01/26, PH1U03312521 exp. 10/01/26,  
PH1U04012511 exp. 10/01/26, PH1U04012521 exp. 10/01/26,  
PH1U03282511 exp. 09/28/26, PH1U03282522 exp. 09/28/26,  
PH1U02252541 exp. 08/25/26, \*PH1U08062421 exp. 02/06/26  
NEW, \*PH1U08062411 exp. 02/06/26 NEW, \*PH1U08052431  
exp. 02/05/26 NEW, \*PH1U08032411 exp. 02/03/26 NEW,  
\*PH1U08032421 exp. 02/03/26 NEW, \*PH1U07252421 exp.  
01/25/26 NEW, \*PH1U05162431 exp. 11/16/25 NEW,  
\*PH1U05162421 exp. 11/16/25 NEW, \*PH1U05162411 exp.  
11/16/25 NEW, \*PH1U05152421 exp. 11/15/25 NEW,  
\*PH1U05152411 exp. 11/15/25 NEW, \*PH1U05152431 exp.  
11/15/25 NEW, \*PH1U03212421 exp. 09/21/25 NEW

Talk to your doctor before you stop taking any medication. Stopping a drug without a replacement could have health risks. Your doctor can talk to you about other options that are right for you.

**What you need to do next:**

- Check your prescriptions to see if you have Omnipod® 5 Pods.
- To see if you have affected product, check the lot number. The lot number can be found on the Pod tray lid, on the flat bottom of the Pod itself, and also on the side of the 5-Pack Pods box. All Pods in the same box will have the same lot number.
- You may also visit [omnipod.com/check-pods](http://omnipod.com/check-pods) and enter all digits after PH1U from your Pod lot number. You can request a replacement for any potentially affected Pod(s).
- Insulet Corporation has advised that consumers immediately discontinue use of the product affected by this Urgent Medical Device Correction. Consumers with questions regarding this Medical Device Correction can contact Insulet Product Support team at 1-800-641-2049 (available 24/7) or use the live agent chat at [omnipod.com/current-podders](http://omnipod.com/current-podders).
- Talk with your doctor about other products to use instead.
- Find more information about this medical device correction at [fda.gov/medwatch](http://fda.gov/medwatch).

**We're here to help**

If you have questions about the medical device correction, please call Insulet Corporation, the manufacturer, at 1-800-641-2049 (available 24/7) or use the live agent chat at [omnipod.com/current-podders](https://omnipod.com/current-podders). You can contact the FDA toll-free at **888-INFO-FDA (888-463-6332)** or visit [fda.gov](https://fda.gov) for more information.

You can also call your doctor or pharmacist if you have questions about the product or about this letter. If you have questions about your prescription drug benefits, please call Pharmacy Member Services at the phone number on your member ID card (TTY users can call **711**).

Sincerely,

Your Wellpoint service team

Enclosures: Language assistance sheet  
Nondiscrimination notice

This information is provided for educational purposes only and should not be considered medical advice. Talk to your physician for specific treatment options and recommendations best suited for you and before beginning any lifestyle program.



**Wellpoint New Jersey**

P. O. Box 62509

Virginia Beach, VA 24466-2509

<Date>

<Padre o tutor de>

<Member Name>

<Member Address>

<Member City, State ZIP>

Estimado/a miembro o padre/tutor de <Member Name>:

Tenemos información importante de la corrección de dispositivo médico actualizada sobre su receta para las bombas Omnipod® 5.

Nuestros registros muestran que usted tal vez ha surtido recientemente una receta de este producto.

Este aviso actualiza una corrección de dispositivo médico emitida anteriormente para incluir lotes afectados adicionales. El 12 de marzo de 2026, Insulet Corporation emitió una corrección de dispositivo médico de determinados números de lote de bombas de Omnipod® 5.

Insulet Corporation emitió esta corrección de dispositivo médico debido a que se identificó un problema de fabricación a través de su monitoreo continuo del producto. De acuerdo con Insulet Corporation, ciertas bombas de lotes específicos pueden tener un pequeño desgarro en el tubo interno que administra insulina. Si esto ocurre, la insulina puede filtrarse dentro de la bomba en lugar de esparcirse completamente por el cuerpo como se pretende, lo que podría provocar una administración insuficiente de insulina.

Insulet Corporation emitió una actualización de esta corrección de dispositivo médico, ampliando la lista de lotes afectados para incluir bombas que han caducado, para mayor precaución.

**Producto:** bombas de Omnipod® 5

**NDC:** 08508-3000-21

**[wellpoint.com/nj/medicaid](https://wellpoint.com/nj/medicaid)**

1091327NJMESWLP 05/26

OMHC# 078-25-59

105-CNMCD26059WLPNJ 051926

**Número de lote/Fecha de vencimiento:** PH1U10242521 vto. 10/24/27, PH1U10242531 vto. 10/24/27, PH1U10242541 vto. 10/24/27, PH1U10232531 vto. 10/23/27, PH1U10232541 vto. 10/23/27, PH1U10222531 vto. 10/22/27, PH1U10222541 vto. 10/22/27, PH1U10212531 vto. 10/21/27, PH1U10212541 vto. 10/21/27, PH1U10202511 vto. 10/20/27, PH1U10202521 vto. 10/20/27, PH1U10202531 vto. 10/20/27, PH1U10202541 vto. 10/20/27, PH1U10182531 vto. 10/18/27, PH1U10182541 vto. 10/18/27, PH1U10172531 vto. 10/17/27, PH1U10172541 vto. 10/17/27, PH1U10162531 vto. 10/16/27, PH1U10162541 vto. 10/16/27, PH1U10152541 vto. 10/15/27, PH1U09252521 vto. 09/25/27, PH1U09252531 vto. 09/25/27, PH1U09242511 vto. 09/24/27, PH1U09242521 vto. 09/24/27, PH1U09242531 vto. 09/24/27, PH1U08182531 vto. 08/18/27, PH1U08182541 vto. 08/18/27, PH1U08162531 vto. 08/16/27, PH1U05052511 vto. 11/05/26, PH1U03312511 vto. 10/01/26, PH1U03312521 vto. 10/01/26, PH1U04012511 vto. 10/01/26, PH1U04012521 vto. 10/01/26, PH1U03282511 vto. 09/28/26, PH1U03282522 vto. 09/28/26, PH1U02252541 vto. 08/25/26, \*PH1U08062421 vto. 02/06/26 NUEVO, \*PH1U08062411 vto. 02/06/26 NUEVO, \*PH1U08052431 vto. 02/05/26 NUEVO, \*PH1U08032411 vto. 02/03/26 NUEVO, \*PH1U08032421 vto. 02/03/26 NUEVO, \*PH1U07252421 vto. 01/25/26 NUEVO, \*PH1U05162431 vto. 11/16/25 NUEVO, \*PH1U05162421 vto. 11/16/25 NUEVO, \*PH1U05162411 vto. 11/16/25 NUEVO, \*PH1U05152421 vto. 11/15/25 NUEVO, \*PH1U05152411 vto. 11/15/25 NUEVO, \*PH1U05152431 vto. 11/15/25 NUEVO, \*PH1U03212421 vto. 09/21/25 NUEVO

Hable con su médico antes de dejar de tomar cualquier medicamento. Dejar de tomar un medicamento sin un reemplazo podría tener riesgos para la salud. Su médico puede hablar con usted sobre otras opciones que sean adecuadas para usted.

**Qué debe hacer a continuación:**

- Verifique sus recetas para ver si tiene bombas de Omnipod® 5.
- Para comprobar si tiene un producto afectado, verifique el número de lote. El número de lote se puede encontrar en la tapa de la bandeja de la bomba, en la parte inferior plana de la bomba y también en el costado de la caja de bombas del paquete de 5. Todas las bombas de la misma caja tendrán el mismo número de lote.

- También puede visitar [omnipod.com/check-pods](http://omnipod.com/check-pods) e ingresar todos los dígitos después de PH1U desde su número de lote de bombas. Puede solicitar un reemplazo de cualquier bomba potencialmente afectada.
- Insulet Corporation ha aconsejado a los consumidores que suspendan inmediatamente el uso del producto afectado por esta corrección urgente de dispositivos médicos. Los consumidores que tengan preguntas sobre esta corrección de dispositivo médico pueden comunicarse con el equipo de soporte de productos de Insulet al 1-800-641-2049 (disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana) o usar el chat de agente en vivo en [omnipod.com/current-podders](http://omnipod.com/current-podders).
- Hable con su médico sobre otros productos para usar en su lugar.
- Encuentre más información sobre esta corrección de dispositivo médico en [fda.gov/medwatch](http://fda.gov/medwatch).

### **Estamos a su disposición para ayudar**

Si tiene preguntas sobre la corrección de dispositivo médico, llame a Insulet Corporation al fabricante al 1-800-641-2049 (disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana) o use el chat de agente en vivo en [omnipod.com/current-podders](http://omnipod.com/current-podders). Puede comunicarse con la línea gratuita de la FDA al **888-INFO-FDA (888-463-6332)** o visitar [fda.gov](http://fda.gov) para obtener más información.

También puede llamar a su médico o farmacéutico si tiene preguntas sobre el producto o sobre esta carta. Si tiene preguntas sobre sus beneficios de medicamentos recetados, llame a Servicios de Farmacia para Miembros al número de teléfono que figura en su tarjeta de identificación del miembro (los usuarios de TTY pueden llamar al **711**).

Cordialmente,

Su equipo de servicio de Wellpoint

Documentos adjuntos:      Reciba ayuda en otros idiomas  
   Aviso sobre no discriminación

Esta información se proporciona solo para fines educativos y no se debe considerar como consejo médico. Hable con su médico para opciones específicas de tratamiento y recomendaciones que mejor se adapten a usted antes de comenzar cualquier programa de estilo de vida.